

INSTRUKCJA POBRANIA MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO

WYMAZY

MATERIAŁ DO BADAŃ POWINIEN BYĆ POBRANY PRZEZ LEKARZA

Sposób postępowania:

Wszelkie czynności związane z pobraniem materiału biologicznego należy wykonywać wyłącznie w rękawiczkach jednorazowych.

Przez okres 24 godzin przed pobraniem należy zrezygnować ze współżycia płciowego oraz ograniczyć zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne okolicy narządów moczowo-płciowych. Nie stosować irygacji. Przez okres 48 godzin przed pobraniem nie należy stosować żadnych środków dopochwowych lub preparatów zewnętrznych. Nie należy pobierać wymazu w okresie krwawienia miesięczkowego.

Badania kontrolne należy wykonywać minimum 3 tygodnie po zakończonym leczeniu.

- I. Sprawdzić zawartość zestawu pobraniowego (szczoteczka do pobrania wymazu, probówka z buforem transportowym, 2 naklejki z indywidualnym numerem seryjnym, instrukcja pobrania materiału biologicznego i zlecenie badania laboratoryjnego).
- II. Wyjąć probówkę oraz szczoteczkę z opakowań ochronnych. Nie należy dotykać białej końcówki szczoteczki.
- III. Pobrać wymaz poprzez kilkukrotne pocieranie i obracanie szczoteczki. W przypadku pobrania wymazu z szyjki macicy lub cewki moczowej należy wprowadzić szczoteczkę na głębokość 1-2 cm.
- IV. Odkręcić probówkę i umieścić w niej białą końcówkę szczoteczki (*białą końcówkę szczoteczki zostawić w probówce*). Następnie szczelnie zakręcić probówkę, wymieszać zawartość poprzez odwracanie probówki około 10 sekund i ponownie umieścić probówkę w opakowaniu ochronnym.
- V. Wypełnić druk zlecenia badania laboratoryjnego i umieścić wraz z probówką w zestawie pobraniowym. Jedną naklejkę umieścić w karcie choroby pacjenta, a drugą przekazać pacjentowi.
- VI. Zestaw pobraniowy zawierający probówkę ze szczoteczką oraz wypełniony druk zlecenia badania laboratoryjnego należy wysłać zamawiając kuriera TNT pod numerem telefonu 22 771 71 71. Należy podać numer klienta Lifemedica Sp.z o.o.- 314829.

Uwaga! Materiał biologiczny powinien być dostarczony do laboratorium w ciągu 3 dni (przechowywanie w temperaturze pokojowej) lub w ciągu 5 dni (przechowywanie w temperaturze 2-8°C). Należy wysłać materiał do badania od poniedziałku do czwartku.

Uwaga! Pobrania materiału biologicznego należy dokonać wyłącznie z wykorzystaniem zestawu pobraniowego dostarczonego przez Lifemedica Sp. z o.o. i zgodnie z instrukcją.