



INSTRUKCJA POBRANIA MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO WYMAZY

MATERIAŁ DO BADAŃ POWINIEN BYĆ POBRANY PRZEZ LEKARZA

Sposób postępowania:

Wszelkie czynności związane z pobraniem materiału biologicznego należy wykonywać wyłącznie w rękawiczkach jednorazowych.

Przez okres 24 godzin przed pobraniem należy zrezygnować ze współżycia płciowego oraz ograniczyć zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne okolicy narządów moczowo-płciowych. Nie stosować irygacji. Przez okres 48 godzin przed pobraniem nie należy stosować żadnych środków dopochwowych lub preparatów zewnętrznych. Nie należy pobierać wymazu w okresie krwawienia miesięczkowego.

Badania kontrolne należy wykonywać minimum 3 tygodnie po zakończonym leczeniu.

- I. Sprawdzić zawartość zestawu pobraniowego (2 szczoteczki do pobrania wymazu, 2 probówki z buforem transportowym, 1 naklejka z indywidualnym numerem seryjnym, instrukcja pobrania materiału biologicznego i zlecenie badania laboratoryjnego).
- II. Wyjąć probówkę oraz szczoteczkę z opakowań ochronnych. Nie należy dotykać białej końcówki szczoteczki.
- III. Pobrać wymaz poprzez kilkukrotne pocieranie i obracanie szczoteczki. W przypadku pobrania wymazu z szyjki macicy lub cewki moczowej należy wprowadzić szczoteczkę na głębokość 1-2 cm.
- IV. Odkręcić probówkę i umieścić w niej białą końcówkę szczoteczki (*białą końcówkę szczoteczki zostawić w probówce*). Następnie szczelnie zakręcić probówkę, wymieszać zawartość poprzez odwracanie probówki około 10 sekund i ponownie umieścić probówkę w opakowaniu ochronnym.
- V. W przypadku zamówienia badania Panel IV pobrać materiał do dwóch probówek, dołączonych do zestawu.
- VI. Wypełnić druk zlecenia badania laboratoryjnego i umieścić wraz z probówką w zestawie pobraniowym. Jedną naklejkę umieścić w karcie choroby pacjenta.
- VII. Zestaw pobraniowy zawierający probówki ze szczoteczkami oraz wypełniony druk zlecenia badania laboratoryjnego należy wysłać zamawiając kuriera DHL. Należy wejść na stronę <https://dhl24.com.pl/zwroty/>, podać numer przesyłki do zwrotu, który znajduje się na etykiecie zwrotnej (etykieta zostaje wydrukowana i wysłana wewnątrz opakowania, wraz z wysyłanym towarem i jest ważna przez 90 dni)
Uwaga! Materiał biologiczny powinien być dostarczony do laboratorium w ciągu 3 dni (przechowywanie w temperaturze pokojowej) lub w ciągu 5 dni (przechowywanie w temperaturze 2-8°C). Należy wysłać materiał do badania od poniedziałku do czwartku.

Uwaga! Pobrania materiału biologicznego należy dokonać wyłącznie z wykorzystaniem zestawu pobraniowego dostarczonego przez Lifemedica Sp. z o.o. i zgodnie z instrukcją.